

# Alkasept-Ultra

## Descontaminante Universal de Instrumental

Alkasept-Ultra es un agente detergente pre-desinfección. Específicamente formulado para ayudar en el reprocesamiento, a través del lavado manual, de todo el instrumental médico dental sumergible reutilizable, previo a una esterilización. También se aconseja para usar en baño ultrasónico.

### Sin Riesgos de Uso

Libre de aldehídos, cloro y fenoles. Alkasept-Ultra es al mismo tiempo seguro y agradable de utilizar por su aroma anaranjado. Alkasept-Ultra es amigable con el medio ambiente. La solución no es tóxica y es totalmente biodegradable.

### Económico

Presentado en su forma concentrada con sistema dosificador Alkasept-Ultra es diluido en agua común a un 2% de dilución permitiendo obtener 50 litros de una solución de fuerte poder por cada frasco de 1 litro.

### Instrucciones de Uso

#### 1. Para ser utilizado en limpieza y pre-esterilización de Instrumentos

Usando el dosificador diluir Alkasept-Ultra en agua tibia y limpia de la llave obteniendo una solución al 2% (20 ml. por cada litro de agua de la llave)

Sumergir completamente (de preferencia desarmado) el instrumental en la solución.

Utilizar de preferencia ropa protectora, frotar el instrumental cuidadosamente con la ayuda de un cepillo largo.

Enjuagar los instrumentos cuidadosamente removiendo todo resto de solución de limpieza, inspeccionar que no quede contaminación visible en el instrumental.

#### 2. Para ser usado en lavadora Ultrasónica

Alkasept-Ultra concentrado diluido en una solución al 2% es mas aconsejable para ser usado en baño ultrasónico para la limpieza y pre-esterilización del instrumental dando un mínimo de 5 minutos de tiempo de contacto.

### Composición Química

DIDECYL METHYL  
POLYAMMONIUM PROPIONATE  
SURFACTANTES NO IONICOS

**INTERMED S.A.**

— ALKAZYME<sup>®</sup> —

+

— ALKACIDE<sup>®</sup> —

**ALKASEPT – ULTRA**

ES UN PRODUCTO IMPORTADO DESDE  
ALKAPHARM UK Y DISTRIBUIDO POR  
INTERMED S.A.

SIMON BOLIVAR 4931 ÑUÑO A SANTIAGO  
FONO: 266 17 50 FAX: 266 25 38  
EMAIL: CONSULTAS@INTERMED.CL



### Actividad Microbica

De acuerdo a ISO 9002 de estándares de calidad, Alkapharm confía la evaluación de la eficacia antimicrobiana de sus productos a laboratorios independientes acreditados por COFRAC, los cuales garantizan la reproducción de los resultados de estos estudios y la observancia de la metodología de prueba.

### CONCENTRADO

Al ser diluido con agua para usar una solución fuerte tal como lo indican las "instrucciones de uso". Alkasept-Ultra es clasificado como no peligroso para la salud 88 / 379 / EBC

### SOLUCION ALKASEPT-ULTRA 2%

Bactericida	EN 1040
Bactericida	NFT 72- 970
Fungicida *	EN 1275 (* Candida Albicans)
Activo Contra	H.I.V. y H.B.V.

### Precauciones de Uso (de acuerdo a la instrucción de las etiquetas)

#### Solo para uso profesional

**Concentrado:** diluido de acuerdo a instrucciones de uso.

**S2** Mantener fuera del alcance de los niños

**S24/25** Evitar contacto con la piel y los ojos

**S37** Aconsejable utilizar guantes

- Cambiar la solución diariamente.

- Solución no utilizada puede almacenarse hasta 7 días.

- Para métodos de almacenamiento consultar ficha de seguridad

- Contenedor vacíos deben ser cuidadosamente enjuagados con agua previo a su eliminación o reciclaje.

### Cuidado del Instrumental

1.- Evitar la corrosión separando el acero inoxidable de otro instrumental y desinfectar separadamente.

2.- Descartar instrumental corroido (las partículas de oxido son transferidas de un instrumental a otro durante la limpieza, desinfección y esterilización)

3.- Para preservar la vida útil instrumental, un segundo enjuague con agua desmineralizada es recomendable.

### Presentación

En frascos de 1 litro concentrado con dosificador.